




**UrgoStart Plus Pad es un apósito con tecnología TLC-NOSF impregnado en fibras poliabsorbentes**



La TLC-NOSF, es una tecnología exclusiva de Laboratorios Urgo, que permite:

- Reducir el exceso de metaloproteinasas
- Cerrar antes una herida
- Reducir el tiempo de cicatrización

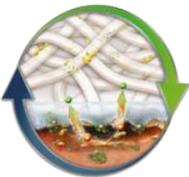

Las fibras poliabsorbentes:

- Absorben, retienen y actúan sobre las causas del exudado
- Tienen una gran capacidad de limpieza continua

## PROPIEDADES



- Acelera la cicatrización y cierra antes la heridas gracias a la reducción del exceso de metaloproteasas (MMP).



- Limpieza continua: atrapan el detritus por interacción electrostática.



- Absorben el exudado moderado de forma vertical.

- Permiten la retirada en monoblock si dejar residuos en el lecho.

- Poder hemostático.



- Mantenimiento de un ambiente húmedo que favorece el proceso de cicatrización de la herida.

## INDICACIONES

UrgoStart Plus Pad está indicado para:

- Toda herida no infectada, con tejido esfacelado o fibrinoso.
- Para heridas cavitadas.
- Para todas las fases: inflamación, granulación, epitelización.

## CONTRAINDICACIONES

- UrgoStart Plus Pad no debe utilizarse como una esponja quirúrgica para las heridas que sangran fuertemente.
- UrgoStart Plus Pad está contraindicado en heridas cancerosas y heridas de fístula que pueden deberse a un absceso profundo.
- No utilizar cuando no hay una sensibilidad conocida a UrgoStart Plus Pad.

## MODO DE EMPLEO

### 1. Preparación de la herida:

- Limpie la herida según el protocolo local y enjuague la herida con solución salina normal.
- Seque cuidadosamente la piel circundante.
- El uso de UrgoStart Plus Pad no dispensa la necesidad de desbridamiento mecánico si es necesario.

### 2. Aplicación del apósito:

- Retire suavemente las aletas protectoras.
- Aplique la cara adherente de UrgoStart Plus Pad en la herida.

 UrgoStart Plus Pad se puede cortar para ajustarse al lecho de la herida.

- En caso necesario, cubrir con un apósito secundario.
- Aplicar un sistema de vendaje de compresión cuando se prescriba.

### 3. Renovación del apósito:

Se recomienda cambiar UrgoStart Plus Pad cada 1 - 2 días durante la fase de desbridamiento de la herida, luego adaptar la frecuencia de renovación según el estado clínico de la lesión y del nivel de exudado, pudiéndose dejar hasta 7 días.

## ADVERTENCIAS DE EMPLEO

- La capa adherente de UrgoStart Plus Pad se adhiere a los guantes quirúrgicos de látex. Se recomienda utilizar las aletas para facilitar la aplicación del apósito.
- Si la herida muestra signos de infección local, se recomienda usar primero un tratamiento antimicrobiano como UrgoClean Ag.
- Durante la fase de limpieza, la herida puede parecer más grande debido a la eliminación gradual de detritus.
- UrgoStart Plus Pad no debe utilizarse con una cámara hiperbárica.

